



Advertências:
Manter fora do alcance de crianças;
Nunca encoste na plataforma de aquecimento. Esta região fica aquecida e pode ocasionar queimaduras.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em local seco, ao abrigo da luz solar.

Manter o produto na embalagem original.

A limpeza da Mini-incubadora EVOXX deve ser feita com pano macio, água e sabão neutro. O uso de outros produtos químicos pode causar danos ao equipamento.

RESULTADOS

- A ampola que não foi autoclavada deverá apresentar uma coloração amarela, confirmando que os microrganismos foram capazes de crescer.

- A ampola que foi autoclavada (passou pelo processo de esterilização) deverá permanecer com a coloração roxa, confirmando que a esterilização foi bem sucedida. Observe ainda que após a esterilização, o indicador químico da etiqueta deverá mudar de rosa para marrom.

- Se as duas ampolas apresentarem coloração amarela após a incubação, isto indica que houve crescimento bacteriano em ambas. Logo conclui-se que a esterilização não foi efetiva.

1 Separe duas ampolas do indicador biológico do mesmo lote. Uma ampola passará pelo ciclo de esterilização, a outra ampola servirá como controle. **Evite a queda das ampolas!**

2 Faça a identificação de cada ampola, escreva os números de identificação do equipamento e da carga, assim como a data do processamento no rótulo da ampola.

3 Coloque uma das ampolas do indicador biológico em um envelope grau cirúrgico dentro da autoclave e realize o ciclo padrão de esterilização.

4 Terminado o ciclo de esterilização, aguarde 10 minutos para que ocorra o resfriamento, abra o envelope e recupere a ampola.

5 Introduza a ampola no quebrador exclusivo, dobre levemente. Repita essa mesma operação na ampola controle.

6 Segure a ampola delicadamente e dê uma leve batida na parte inferior, garantindo que o meio de cultura roxo entre em contato com o disco carregado de esporos no fundo da ampola.

7 Após 15 minutos de aquecimento a Mini-incubadora EVOXX está pronta para o uso. Coloque as ampolas para incubar e siga o tempo descrito no rótulo do Indicador Biológico.

8 Passado o tempo descrito no rótulo do indicador biológico, retire as ampolas da Mini Incubadora EVOXX.

10 Retire a etiqueta de cada ampola e cole-as em um livro de registro, anote o resultado referente a cada ampola em suas respectivas etiquetas.

11 Arquive a documentação de monitoramento da esterilização, guarde estes documentos de acordo com a legislação vigente.

FAÇA A LEITURA:



Coloque aqui sua Mini-incubadora EVOXX



ATENÇÃO!

NÃO CHACOALHE AS AMPOLAS!
Na parte superior próximo a tampa há um filtro hidrofóbico que não deve ser molhado

